

# SWISS-TRAC Transport-Banner

für Flugreisen / pour voyages en avion /for air travel

## Schritt 1

Banner unter Gepäckträger durchschieben und Gummiband hinten beidseitig um die grossen Räder führen.

Glisser la bannière sous porte-bagage et tirer l'élastique d'arrêt en arrière sous les grandes roues.

Slide banner underneath baggage carrier and stretch the elastic bands from behind over both big wheels.



## Schritt 2

Den Swiss-Trac ca. 20 cm langsam rückwärts fahren und nach hinten unten auf die Deichsel kippen.

Faire lentement marche arrière avec le trac environ 20cm et le trac balancer sur le bras d'attelage.

Drive Swiss-Trac slowly backwards app. 20 cm and tilt backwards onto the drawbar.



## Schritt 3

Das Gummiband vorne über die kleinen Räder spannen und am Anschlagzapfen anhängen.

Glisser l'élastique sur les petites roues et le fixer sur les boulons d'arrêt.

Draw elastic bands over the small wheels and hook them to the stop pins.

Zum Entfernen des Banners in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Pour enlever la bannière, procéder en ordre inverse.

To remove the banner reverse the procedure.



## Transport

Zusammengefaltet kann das Banner im Innern des Swiss-Trac mitgeführt werden.

La bannière peut être pliée et transportée à l'intérieur du trac

When folded banner can be stored inside Swiss-Trac.

## Achtung:

Bitte beachten Sie, dass die Gummibänder beim Falten innen liegen und nicht seitlich über die Batterien herunter hängen.

## Attention:

Veillez à ce que les élastiques soient bien rangés à l'intérieur de la bannière pliée et ne tombent pas des deux côtés des batteries



## Attention:

Please fold the elastic bands inwards when storing the banner so that they don't hang over the batteries.